

Breathe




Améliorer **votre respiration**
éviter **la buée** sur vos lunettes
plus de **masque humide** collant à la bouche

Comment installer son "Breathe" ?




l'objet !

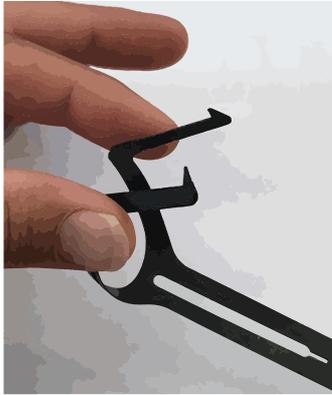

Courbez les deux ailettes




Jusqu'au contact des deux pointes

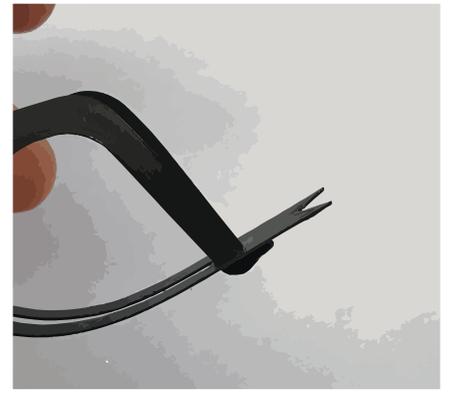


Et insérez les dans la fente



Posez le sur le milieu de votre masque
votre index le tient par l'extrémité

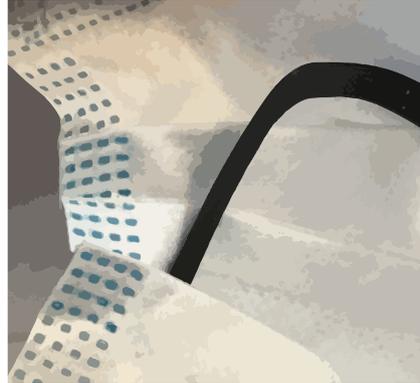

Maintenez l'index appuyé et mettez les ailettes
dans le pli le plus bas à gauche et à droite

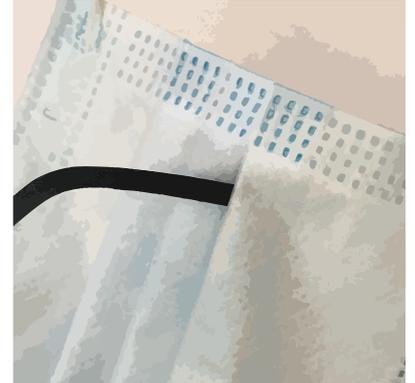

Dépliez les plis du masque



Ajustez le pincez au niveau du nez



Respirez !



Vous devez impérativement avoir les mains propres avant d'effectuer cette installation. le Breathe se nettoie avec du gel ou du savon
Cet accessoire ne change en rien les conditions d'utilisation du masque notifiées dans la notice de vos masques chirurgicaux.